



2019

## Snabbguide till appen

# Predictable Svensk (android)

### Introduktion:

- Skriv genom att använda tangentbordet, fraser eller skrivplattan (ikon nere till höger). Du kan också hämta favoritfraser genom att klicka på hjärtsymbolen (nere till höger).
- Du kan lägga till känsloutryck (glada gubben).
- Det du skriver kan skickas med sms, mejl, Facebook eller Twitter. Klicka på skicka-symbolen (papper med pil). Här kan du också kopiera din text (och klistra in den någon annanstans) eller lägga till den som fras eller favorit.
- Fraserna som ingår är illustrerade med Widgitsymboler. Du kan inte hämta fler, men du kan komplettera med dina foton.
- Ordprediktionen lär sig nya ord och vilka ord som används frekvent eller följer efter varandra.
- Man kan ha talsyntes som läser upp. Fraserna du lägger in kan du spela in eget ljud till.
- Man kan ändra uttal.



The screenshot shows the Predictable app interface. At the top right, there is a vertical menu with icons and labels: a speaker icon for 'Läs upp', a paper plane icon for 'Skicka-knapp', a trash can icon for 'Sudda', a list icon for 'Fraser', and a smiley face icon for 'Känsloutryck/Emote'. Below this is a keyboard with columns labeled 'Det', 'Jag', 'Men', 'Du', 'Och', and 'Om'. The keyboard keys include letters Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P; A, S, D, F, G, H, J, K, L, Å; Z, X, C, V, B, N, M, Ä, Ö, and a backspace key. The bottom row contains an arrow icon, '123', a gear icon for 'Inställningar', a 'Mellanslag' key, a left arrow key, a notepad icon for 'Skrivplatta', a heart icon for 'Favoritfraser', and a bell icon for 'Signal'. Red arrows point from the text labels to the corresponding icons in the interface.

Det	Jag	Men	Du	Och	Om				
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K	L	Å
Z	X	C	V	B	N	M	Ä	Ö	✕
↑	123	⚙️	Mellanslag	←	📝	❤️	🔔		

**Inställningar** (gear icon)  
**Skrivplatta** (notepad icon)  
**Favoritfraser** (heart icon)  
**Signal** (bell icon)

**Läs upp** (speaker icon)  
**Skicka-knapp** (paper plane icon)  
**Sudda** (trash can icon)  
**Fraser** (list icon)  
**Känsloutryck/Emote** (smiley face icon)

## Så här lägger du in nya fraser:

1. Skriv en mening.
2. Klicka på skicka-symbolen (papper med pil) och **Lägg till fras**.
3. Välj en kategori.
4. Välj ett foto från kameraalbumet eller ta ett nytt.
5. Klicka på **Nästa**.
6. Om du vill ha ett inspelat ljud (och inte talsyntes) klickar du på **Spela in** och därefter på bilden av mikrofonen. Klicka på **den röda fyrkanten** när du pratat färdigt.

## Inställningar:

- **Välj:** ställ in önskad röst. Om du inte har en röst i din platta/telefon måste du köpa en från Acapela. Kostar ca 40 kr. Talhastigheten ställer du in i **plattan/telefonens inställningar** (sökvägen kan vara olika men ofta Kontroll -> Språk och inmatning -> Alternativ för text-till-tal)
- **Förutsägelse av ord:** Här kan du ändra uttal och lägga in förkortningar
- **Layout:** Under **Val av Quick Keys** väljer du vilka snabbknappar som ska vara synliga på tangentbordet. Du kan också välja om du vill ha snabbknapparna till höger (som på bilden ovan) eller till vänster.
- **Kännetecken:** Här ställer man bland annat in knappljud och varningsljud (signal).
- **Tangentbord:** Välj typ av tangentbord och vilka tangenter som ska synas. Du kan välja mellan ABC-tangentbord, QWERTY-tangentbord och frekvenstangentbord (de vanligaste bokstäverna först).
- **Backup:** Om du har lagt till egna fraser är det viktigt att du sparar en backup. Det gör du genom att logga in på ditt gratis Therapy Box-konto.
- **Om Predictable:** Här står att det ska finnas en användarguide, men det gör det inte. Däremot går det bra att skriva e-post till företaget och de svarar snabbt (men på engelska). Kontakta gärna Dako om du har frågor!